



Marihuana / THC

Sheltest voor de detectie van drugs in urine
Product-# 21.044E

Inleiding

U hebt besloten een test doen waarmee u de aanwezigheid van afbraakproducten van cannabis (marihuana en hasj) in urine kunt aantonen.

Met deze test heeft u een kwalitatief hoogwaardig product in handen. Lees voor aanvang van de test deze handleiding zorgvuldig door zodat u betrouwbare testresultaten krijgt en deze op een juiste manier interpreteert.

Deze handleiding bevat namelijk belangrijke aanwijzingen die, voor een juiste uitvoering van de test, absoluut gevolgd dienen te worden.

Een verpakking bevat:

- Een plastic pouch met testcassette inclusief een pipet voor het druppelen van de urine.
De plastic pouch pas openen op het moment dat u gaat testen.
- Een gebruikershandleiding

Verder hebt u nodig:

- Een schone beker of glas om de urine in te verzamelen
- Een stopwatch of horloge

Aanwijzingen i.v.m. testmateriaal

Deze test is uitsluitend bedoeld voor het testen in urine en niet geschikt voor toepassingen in ander testmateriaal zoals speeksel of zweet.

Bewaartemperatuur

De gesloten plastic pouch bij kamertemperatuur onder 30°C of in de koelkast (2-8°C) bewaren

Onder deze omstandigheden kan de uiterste houdbaarheidsdatum zoals vermeldt op de pouch gegarandeerd worden.

De test niet gebruiken wanneer de plastic pouch beschadigd is of wanneer de uiterste houdbaarheidsdatum verstreken is.

ACHTERGRONDEN:

Tegenwoordig is het gebruik van drugs voor veel jongeren heel gewoon. Vaak merkt men uiterlijk niets aan deze jongeren zodat familie en andere naasten bijna geen aanwijzingen krijgen die op een eventuele drugsverslaving duiden. Hierdoor kunnen zij de eigenlijke noodzakelijke hulp niet verlenen.

Omdat veel voorkomend gedrag bij drugsgebruikers zoals agressie, verminderde prestaties op school of werk, het zich afzetten tegen ouders ook bij veel puberende jongeren voorkomt en als normaal wordt beschouwd, valt het drugsgebruik vaak niet op.

Wanneer de vriendenkring van de jongere echter verandert of deze in staat blijkt schijnbaar moeiteloos hele nachten uit te gaan dan kunnen dit aanwijzingen zijn die op drugsgebruik duiden.

Spreek met de desbetreffende persoon over uw vermoeden van drugsgebruik en vraag hem of haar een urinemonster af te geven.

Hiermee kunt u dan aantonen of er daadwerkelijk sprake is van drugsgebruik.

KORTE DRUGSWETENSCHAP

Marihuana en Hasj zijn drugs die uit de Cannabisplant worden gewonnen en die hoofdzakelijk door roken geconsumeerd worden. De werkzame stof in cannabis is THC. Het beïnvloedt het centrale zenuwstelsel en het korte termijn geheugen, zorgt voor veranderingen van de gemoedstoestand en zorgt ervoor dat men gevoeliger voor aanrakingen wordt. Ook kan het zorgen voor een verminderd coördinatievermogen, angstgevoelens, waanvoorstellingen, depressies, verwarring, hallucinaties en een verhoogde polsslagen. De THC wordt zeer snel na inname in de lever gemetaboliseerd (afgebroken)

HOE WERKT DE TEST?

Het aantonen van de drug in urine gebeurt door middel van een voor deze drug specifieke gekleurd antilichaam. Wanneer de drug in de urine aanwezig is zal deze een verbinding met dit antilichaam aangaan en verhindert daardoor dat het antilichaam een verbinding met het Testmembraan kan aangaan. De kleur van de testlijn zal met een stijgende drugsconcentratie steeds lichter worden totdat deze uiteindelijk volledig verdwijnt. (Positief testresultaat) De controlelijn zal altijd zichtbaar moeten zijn, het al dan niet aanwezig zijn van de drug in de

Testjezelf.nu BV
Deventerweg 187
7203 AH Zutphen

urine is niet van invloed. De controlelijn dient ter controle van het juist functioneren van de test.

UITVOERING VAN DE TEST

1) Voorbereiding

- Leg de plastic pouch met de test klaar. Wanneer de test in de koelkast werd bewaard moet deze ongeopend voor gebruik eerst op kamertemperatuur gebracht worden.
- Voor het opvangen van de urine heeft u een glas of een beker nodig. Deze moet schoon en droog zijn en mag en geen resten van afwasmiddel bevatten. Verder hebt u een stopwatch of een horloge nodig

2) Urinemonster afnemen


- Vraag de te testen persoon om een urinemonster af te geven.
(in de beker te plassen)

Let op: Manipulatiegevaar

Zorg ervoor dat bij de afgifte van het urinemonster geen manipulatie mogelijk is. Sommige drugsgebruikers zijn zeer vindingrijk om het drugsgebruik, zoals bijvoorbeeld bij politiecontroles, te maskeren. Deze trucs worden soms ook via het Internet verspreid. Zorg ervoor dat er in de ruimte geen vloeistoffen aanwezig zijn die in plaats van de urine in de beker kunnen worden gegoten. Ook mogen geen andere personen en dieren in de ruimte aanwezig zijn. Verder kan men proberen de urine met chemicaliën te vermengen om de test te beïnvloeden. Een chloor- of citroenlucht, andere geurstoffen of schuimvorming van het urinemonster zijn duidelijke aanwijzingen dat het urinemonster is gemanipuleerd. Deze gemanipuleerde urinemonsters mag men niet voor de test gebruiken.


3) Uitvoering van de test

- Neem de testcassette en pipet uit de plastic pouch. De lege plastic pouch en zakje met droogmiddel kunt u bij het normale huisvuil doen. Start onmiddellijk na het openen van de plastic pouch met testen.
- Leg de cassette op een vlakke ondergrond en neem even de tijd om de testcassette rustig te bekijken.

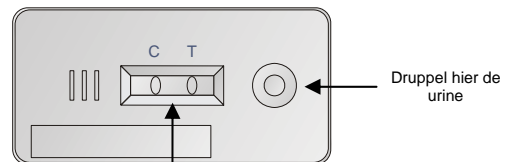

Resultaatvenster : In dit gebied verschijnen na het druppelen van de urine de controlelijn C en bij een negatief resultaat de testlijn T Het resultaatvenster mag bij het druppelen van de urine niet vochtig worden.

- Doop het puntje van de pipet in de urine en zuig een beetje urine op tot aan het streepje op de pipet.
- Druppel nu 3-4 druppels urine in de ronde opening van de testcassette. Start onmiddellijk na het druppelen de stopwatch of het horloge. U ziet nu dat de roodgekleurde vloeistof zich langzaam over het resultaatvenster naar boven beweegt.

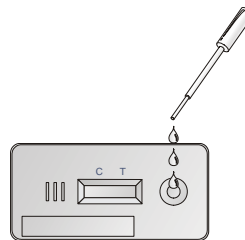

- Lees het testresultaat na 5 minuten af. Later dan 5 minuten aflezen is ook mogelijk echter maximaal 15 minuten. Aflezen na 15 minuten kan een onbetrouwbaar en foutief resultaat opleveren.

4) Interpretatie van het testresultaat

Kijk naar het resultaatvenster om het testresultaat te kunnen interpreteren. Binnen het resultaatvenster zijn één of twee rode lijnen zichtbaar. De controlelijn C moet in ieder geval zichtbaar zijn omdat deze aangeeft dat de test op een juiste manier is uitgevoerd. Daarbij is de sterkte (kleurintensiteit) van deze lijn niet belangrijk. Wanneer er geen

Tel : 0575-512300
Fax : 0575-510164
e-mail : info@testjezelf.nu



C-lijn verschijnt is de test niet goed uitgevoerd en het testresultaat dus ongeldig.

Het verschijnen van de testlijn T is afhankelijk van de drugconcentratie in de urine en geeft het eigenlijke testresultaat aan. De kleurintensiteit van de lijn vermindert bij een toenemende drugsconcentratie in de urine en zal bij een kritische grensconcentratie volledig verdwijnen. Dit is het resultaat dat men kan verwachten bij drugsgebruik. De volgende afbeelding geven aan hoe men het testresultaat moet interpreteren.

Negatief testresultaat:

In het resultaatvenster verschijnen 2 gekleurde lijnen. De controlelijn C geeft aan de test correct is uitgevoerd. De aanwezigheid van de testlijn T geeft aan dat het testresultaat negatief is. De kleurintensiteit van de testlijn T kan daarbij zowel sterker als zwakker zijn dan de controlelijn C. Dit testresultaat betekent dat het urinemonster geen drugs of afbraakproducten hiervan bevat. In ieder geval overschrijdt de concentratie de kritische grenswaarde niet.



Wanneer de test één van de bovenstaande resultaten aangeeft dan kunt u er met hoge waarschijnlijkheid van uit gaan dat de geteste persoon geen cannabis (marihuana / hasj) gebruikt heeft. .

Positief testresultaat:

In het resultaatvenster verschijnt alleen de controlelijn C. De testlijn T ontbreekt en is niet te herkennen. Dit resultaat betekent dat de urine een concentratie drugs of afbraakproducten bevat die de kritische grenswaarde overschrijdt.



Wanneer de test bovenstaand resultaat aangeeft dan kunt u er met hoge waarschijnlijkheid van uit gaan dat de geteste persoon cannabis (marihuana / hasj) gebruikt heeft.

Ongeldig:

Wanneer er geen controlelijn C verschijnt is de test ongeldig, ook wanneer er wel een testlijn T verschijnt. Zie de afbeeldingen hieronder. Herhaal in dat geval de test nog eens met een nieuwe testcassette.



VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat kan ik doen als het testresultaat positief is?

Blijf in ieder geval rustig. Met een eventuele woedeuitbarsting bent zowel u als ook de geteste persoon niet geholpen. Het kan zelfs zo zijn dat een dergelijke reactie een nadelige invloed heeft op de bereidheid van de geteste persoon om zich verder door u of anderen te laten helpen.

Probeer rationeel en helder te blijven denken en handelen en praat met de geteste persoon over de mogelijkheid om hulp te zoeken bij bijvoorbeeld uw huisarts of verslavingszorginstellingen.

Wanneer de geteste persoon tekenen van een acute vergiftiging vertoont neem dan onmiddellijk contact met een (huis)arts op.

Informeer de arts over het positieve testresultaat en neem ook deze handleiding mee.

Een positief testresultaat geeft alleen aan dat de concentratie van de drug in de urine de kritische grenswaarde heeft overschreden. Het geeft de gebruikte hoeveelheid cannabis niet aan.

Wanneer u de test in een laboratorium grondiger wilt laten onderzoeken dan kunt na het testen de testcassette nog 2 dagen gekoeld (tussen de 2-8°C) bewaren.

Denk er a.u.b. aan dat deze test **niet** het gebruik van andere drugs zoals Heroïne, Amfetamine, Cocaine e.d. aantoon.

Voor het testen op gebruik van deze drugs, gebruikt u de voor deze drugstypen specifieke Testjezelf.nu drugscassettes.

Hoe betrouwbaar is de test?

Klinische studies tonen aan dat de Testjezelf.nu drugstesten zeer betrouwbaar zijn.

De kritische grenswaarde waarbij de testlijn T al begint te verdwijnen ligt bij 50 ng/ml.

Door deze lage grenswaarde kan ook een gering cannabisgebruik al worden aangetoond.

Hoe lang zijn deze afbraakproducten van THC in urine aantoonbaar?

De THC wordt door het lichaam afgebroken. De afbraakproducten zijn ca. 2-5 dagen aantoonbaar in de urine, waarbij factoren als lichaamsgewicht en de mate van gewenning op deze tijd van invloed kunnen zijn. Bij regelmatig gebruikers van Cannabis kan dit wel tot 20 dagen na gebruik zijn. De test is zeer gevoelig en toont al een betrekkelijk kleine concentratie (50 ng/ml) in de urine aan.

VOOR UW VEILIGHEID

- Volg a.u.b. deze handleiding nauwkeurig. Om een betrouwbaar resultaat te verkrijgen is het zeer belangrijk de test uit te voeren zoals in de handleiding beschreven staat.
- De test alleen voor onderzoek in urine gebruiken. Andere lichaamsvloeistoffen mogen niet worden gebruikt. De test niet innemen.
- De test buiten bereik van kinderen bewaren.
- Een test waarbij de pouch beschadigd is of waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is mag niet meer worden gebruikt.
- De test slechts eenmaal gebruiken.
- Deze test bevat potentieel infectieus materiaal (b.v. antilichamen) Wanneer deze test correct volgens de handleiding wordt uitgevoerd bestaat er geen besmettingsgevaar.
- Gebruikte testen kunnen bij het normale huisafval.

VERKLARING VAN DE GEBRUIKTE SYMBOLEN



Chargennummer



Houdbaarheidsdatum

Bewaartemperatuur

Versie: 2007/04